

Hüft - Adduktions - Führungsschlinge* (nach Wurster)

Die Dynamische Hüft-Adduktions-Führungsschlinge bietet eine Lösung für Kinder, deren Hüften in Froschhaltung, d.h. in ausgeprägter Abspreizung gehalten werden und wenn aufgrund dieser Lage Fehlstellungen drohen oder bereits Fehlstellungen und Kontrakturen aufgetreten sind. Sie wird in der Regel in der Nacht getragen und fördert das richtige Hüftwachstum.

Ziel

Ziel der Therapie mit der Dynamische Hüft-Adduktions-Führungsschlinge ist es, die medizinisch erforderliche Heranführung des Hüftgelenks in eine Adduktions / Mittelstellung beim Schlafen sicher zu stellen. Dabei beeinträchtigt sie die Bewegungsfreiheit im Schlaf nur geringfügig und unterstützt eine symmetrische Haltung im Rumpf. Damit beugen Sie Hüftfehlstellungen und Kontrakturen vor, bzw. trägt mit dazu bei, diese wieder zurück zu drängen. Die Hüftschlinge sollte nach einer Eingewöhnungszeit die ganze Nacht getragen werden.

Indikation

Die Dynamische Hüft-Adduktions-Führungsschlinge ist in folgenden Fällen sinnvoll:

- Bei Kindern mit Froschhaltung der Beine
- Bei Hypotonie mit ausgeprägter Abspreizung der Beine
- Hohe lumbale und thorakale Querschnittslähmung (Spina bifida)
- SMA (Spinale Muskelatrophie), Neuromuskuläre Erkrankungen
- Hypotone Zerebrale Bewegungsstörungen
- Als Alternative zu herkömmlichen statischen Lagerungssystemen in Rückenlage



* Nach Maß in Sonderanfertigung (Artikelnummer ADD-001)

Vorteile

- **Führt, aber begrenzt nicht**

Die Dynamische Hüft-Adduktions-Führungsorthese erlaubt durch ihre spezielle Konstruktion einen individuell einstellbaren leichten Zug in die Adduktion der Beine (Anspreizung). Dabei wird die Bewegung der Beine eingeschränkt, aber nicht starr begrenzt. Die Kinder können sich auch über die Seite auf den Bauch drehen, oder wenn die motorische Entwicklung dies erlaubt mit der Orthese geführt krabbeln.

- **Angenehm zu tragen**

Die Hüftorthese besteht aus kaschiertem elastischen Gewebe, kann auf der Haut oder über dem Schlafanzug getragen werden. Dynamische Hüft-Adduktions-Führungsorthese wird individuell auf Maß gefertigt.

- **Flexibel**

Klettverschlüsse erleichtern den Zugang, die Einstellung und Einflussnahme auf die Rotationsstellung der Beine.

