

ProWalker®

Das schienengeführte Gehsystem von Pro Walk, das sich problemlos handhaben und individuell an die Bedürfnisse des Kindes anpassen lässt.



ProWalker - jetzt auch bei Facebook



HMV-Nr.: 10.46.02.3008

■ Der ProWalker®

Der ProWalker® ist ein schienengeführtes Gehsystem für schwerst-
gehbehinderte Kinder, die ihr Körpergewicht nicht vollständig tragen
und ihre Gehbewegung nur unzureichend steuern können.

Das Gerät ist für Kinder von etwa 3 bis 14 Jahren konzipiert.
Das Körpergewicht kann bis zu 45 kg betragen, die Körpergröße
darf 150 cm nicht überschreiten. (140 cm Körpergröße plus 10 cm
Toleranz im Längenwachstum). Der ProWalker® besteht aus zwei
Baugruppen: Dem Fahrgestell und einem individuell auf Maß gefer-
tigten Schienensystem.

■ Das Fahrgestell

Das Fahrgestell (Chassis) bewegt sich auf speziellen Leichtlauf-
rädern. Die beiden vorderen Rollen sind schwenkbar, damit der
ProWalker® mit wenig Kraft und Energieaufwand in alle Richtungen
bewegt werden kann. Zwischen Hinterachse und Mittelsäule ist ein
Federsystem integriert. Mit diesem System läßt sich das Körper-
gewicht auf die Füße stufenlos regulieren, wodurch das Gehen
erleichtert wird.

Das Fahrgestell besteht aus Aluminium. Es ist daher leicht und
stabil. Sollte Ihr Kind den ProWalker® nicht mehr benötigen,
kann das Fahrsystem mit einem anderen Schienensystem wieder-
verwendet werden (Wiedereinsatz).

■ Das Schienensystem

Das Schienensystem des ProWalkers® wird für jedes Kind individuell
nach Maß gefertigt. Es kann und darf daher auch nur von diesem
Kind genutzt werden. Es wird im Chassis verankert, nachdem es
dem Kind außerhalb des ProWalkers® liegend/sitzend/stehend
angezogen wurde. Der Ein- und Ausstieg in den ProWalker® ist
denkbar einfach. Durch einstellbare Umlenkzüge zieht das nach
vorne gehende Bein das andere automatisch nach hinten. Das
normale Gehen, bei dem man einen Fuß vor den anderen setzt,
wird so angebahnt, unterstützt und geführt. Zudem wird die Bein-
bewegung des Kindes automatisch in die richtige Richtung gelenkt.
Das System wächst mit Ihrem Kind: Es ist so konstruiert, dass ein
Längenwachstum der Beine von etwa 10 Zentimetern ausgeglichen
werden kann. Da es individuell gefertigt wird und individuellem
Verschleiß ausgesetzt ist, wird das Schienensystem vom Hersteller
nicht für den Wiedereinsatz freigegeben.

■ Lieferumfang des ProWalkers®

Das Fahrgestell

- Chassis – wahlweise mit schmaler oder breiter Frontachse –
abhängig von der Körpergröße
- Ausziehbarer Rahmenvorbau (Längenverstellung über Raster)
- Zwei Umlenkzüge mit Umlenkrollen an der Frontachse zur
besseren Längsführung der Gehbewegung (achsiale Führung)
- Zwei Umlenkzüge mit Umlenkrollen am Heck für die Führung
und Streckung der Oberschenkel (Paar)
- Federsystem, individuell stufenlos nach Körpergewicht einstellbar
- spezielle Leichtlaufräder
- Spurarretierung für Fronträder zum besseren Geradeauslaufen
- Feststellbremsen an den Fronträdern

Das Schienensystem:

- Beckenspanne, in der Breite verstellbar
- Spezielles Hüftgelenk mit stufenlos einstellbarer
Abduktion (Spreizung)
- Hüftgelenke in der Tiefe verstellbar
- Beinschienen aus Titan, stufenlos längenverstellbar
- Wadenmanschette
- Kniegelenk mit spezieller Verriegelungsoption
- Knöchelgelenk mit stufenlos einstellbarem Anschlag
- Fuß- und Schuhaufnahme mit neuem Quick-Release-Adapter
- Kugelkopfaufnahme am Kniegelenk zur Unterstützung und
Anbahnung der Schreitfunktion

Zubehör für das Fahrsystem:

- Aufrichthilfe vorne, höhen- und winkelverstellbar
- Lenkachse
- Schiebestange
- Therapietisch
- Handfixierung

Zubehör für das Schienensystem:

- Wadenschelle mit Führung der Kniekondylen
- Schreithilfe: Das Gehen kann von Eltern und Therapeuten
mit den Schreithilfen angebahnt und geführt werden
- Kopfstützensystem/Kopfhaltensystem
- Oberschenkelmanschette



Neues Kniegelenk mit spezieller Verriegelungsmechanik des Gelenks. So wird die Gehhilfe zur Stehhilfe und zu einem vollwertigen, individuell angepassten Stehtrainer.



Spurarrretierung für Fronträder zum Geradeauslaufen mit integrierter Feststellbremse.




Schuhe am ProWalker adaptiert



Hochwertige Titanschienen, stufenlose Längen Anpassung

Quick Release-Verschluss

Anschlagsbegrenzung

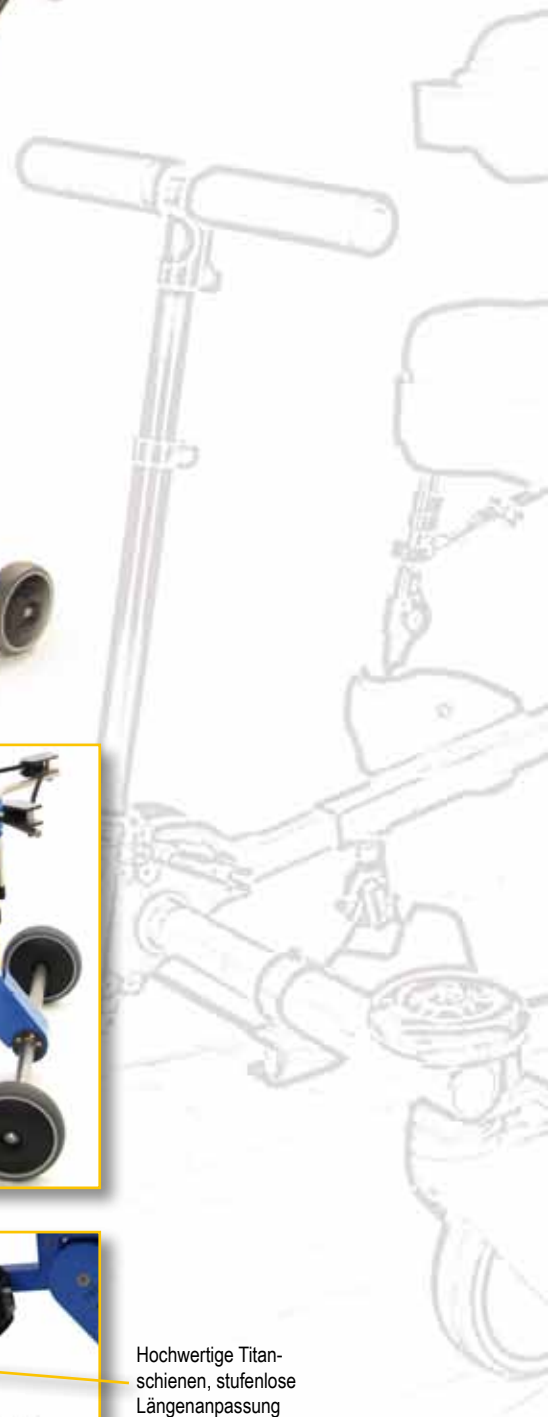



Liebe Kunden!

Kinder liegen uns sehr am Herzen. Gerne möchten wir auch für Ihr Kind die bestmögliche Versorgung mit dem **ProWalker®** sicherstellen.

Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Sie erreichen uns unter der **kostenlosen Hotlinenummer:**

0800 888 0102

oder über **E-Mail: info@prowalker.de**

Vertrieb und Service

Der **ProWalker®** wird nur über den Sanitätsfachhandel, also durch geschulte Orthopädie- und Reha-Techniker vertrieben. Diese haben eine entsprechende Schulung erfolgreich absolviert und können Kinder kompetent versorgen. Der **ProWalker®** wächst Dank zahlreicher Einstellmöglichkeiten mit. Notwendige Anpassungen und Änderungen sind mit geringem Aufwand möglich. Wir empfehlen eine Kontrolle in halbjährlichen Abständen.

Änderungen sind in Bauart und Ausführung, insbesondere wenn sie technische Verbesserungen betreffen, vorbehalten.

Pro Walk GmbH
 Woogstraße 48
 D-63329 Egelsbach
 Telefon: (0 61 03) 7 06 42 - 0
 Telefax: (0 61 03) 7 06 41 - 39
www.prowalk.de
 E-Mail: info@prowalker.de

